

FINA

Digital Arkivering af blokke

Blok arkivering

- Lene Rud Tarp
- Patologisk afdeling på Esbjerg sygehus
 - 12 bioanalytiker, 6 patologer
 - Ca 300- 400 blokke om dagen

Blok arkivering

- Før Fina
- Hvorfor digital arkivering
- Fina
 - Opstart
 - Arkivering af blokke
 - Fremfindning af blokke
 - Makroblokke
 - Fjerndepot
- Fordele/ulemper

Før Fina



- Arkivering i Skuffer i nummer orden
 - Tog lang tid
 - Kaos ved sygdom og travshed
 - Fejl arkivering
 - Svær at finde igen
 - Ikke plads til ekstra blokke

Før Fina



- Arkivering i Skuffer i nummer orden
- Pap bakker efter tre år
 - Ustabile
 - Svære af finde blokkene I

Digital arkivering

- Efterår 21
 - Fik bevilliget penge til et nyt arkiveringsystem
- Hvorfor FINA ?
 - Havde set det hos Axlabs
 - Nemmere, hurtigere, dyere
 - Nu med integration med CGI

FINA



FINA



FINA



FINA

- Installerede FINA i jan 22
 - Satte reolerne op
 - Installerede scanner og pc
 - Gik i gang

FINA

- Installerede FINA i jan 22
 - Satte reolerne op
 - Installerede scanner og pc
 - Gik i gang
- Nem implementering
 - Alle var med på ideen
 - Kunne se fordelene
 - Let at bruge

FINA

- Installerede FINA i jan 22
 - Satte reolerne op
 - Installerede scanner og pc
 - Gik i gang
- Nem implementering
 - Alle var med på ideen
 - Kunne se fordelene
 - Let at bruge
- Tog lidt tid før alle huskede at ALTID scanne blokkene
 - Vejledning og Uddannelsesplan

Uddannelsesplan		KPA			
Fina arkiveringsystem					
Navn: _____					
Ikke aktuelle felter skraveres					
Punkter der skal gennemgås	Gennemgået Sæt X	Udført Sæt X	Dato for Godk.	Godkendt af/INI	Kommentarer
Arkivering og indscanning:					
1					
2					
3					
4					
Fremfindning af blokke:					
5					
6					
Makroblokke:					
7					
Flytning af skuffer:					
8					
9					
Fejlmeldinger:					
10					
Nødprocedure:					
11					

Ved delarbejdspladser kan "godkendt" feltet anvendes til at godkende en del af arbejdspladsen.

Beskrivelse af uddannelsesforløb:
Fina bliver gennemgået med specialist, herefter afprøves systemet selvstændig efter forskrift

- ½ time ifølge med specialist

Litteratur	Vist	Læst	Dato	Kommentarer
Læst:				
Fina arkiveringsystem DokID 958722				

Kan udføre rutinearbejde

Dato: _____ Medarbejder: _____ Specialist: _____


Daglig brug:

- Blok Arkivering:





Daglig brug:

- Blok Arkivering:

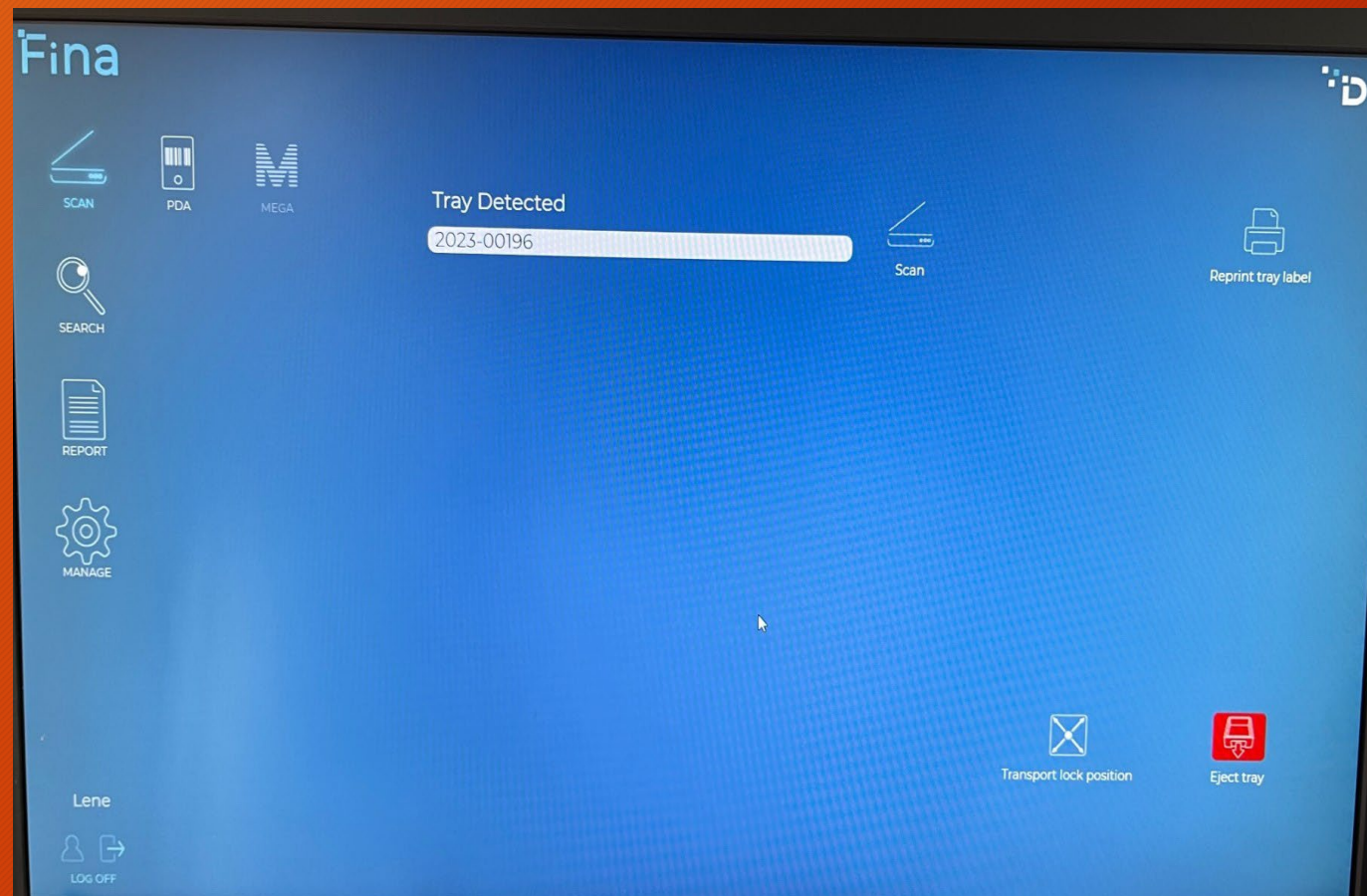

Daglig brug:

- Blok Arkivering:

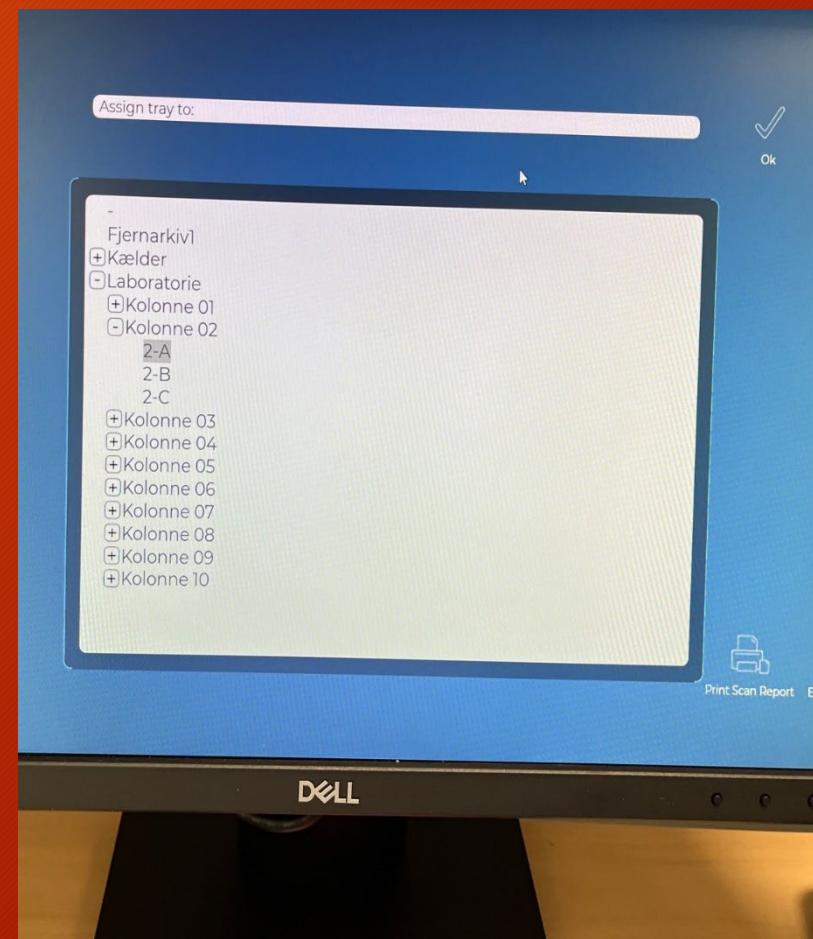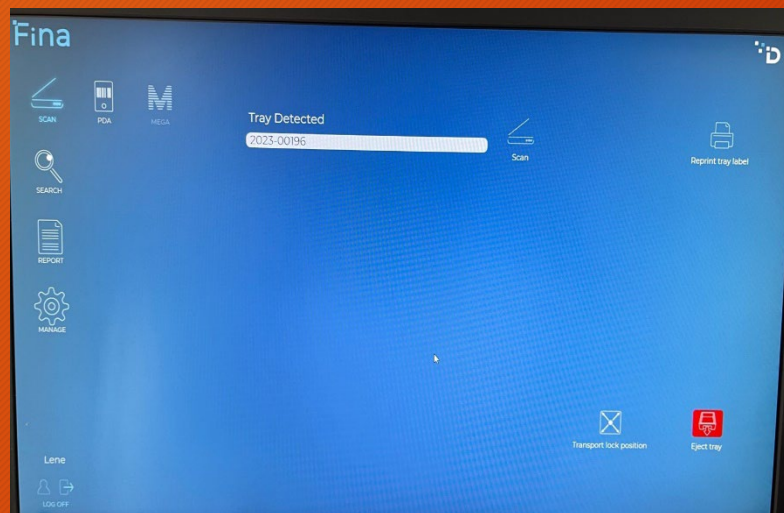


Daglig brug:

- Blok Arkivering:
 - Dårlige stregkoder:

Daglig brug:

- Blok Arkivering:
 - Dårlige strekkoder:

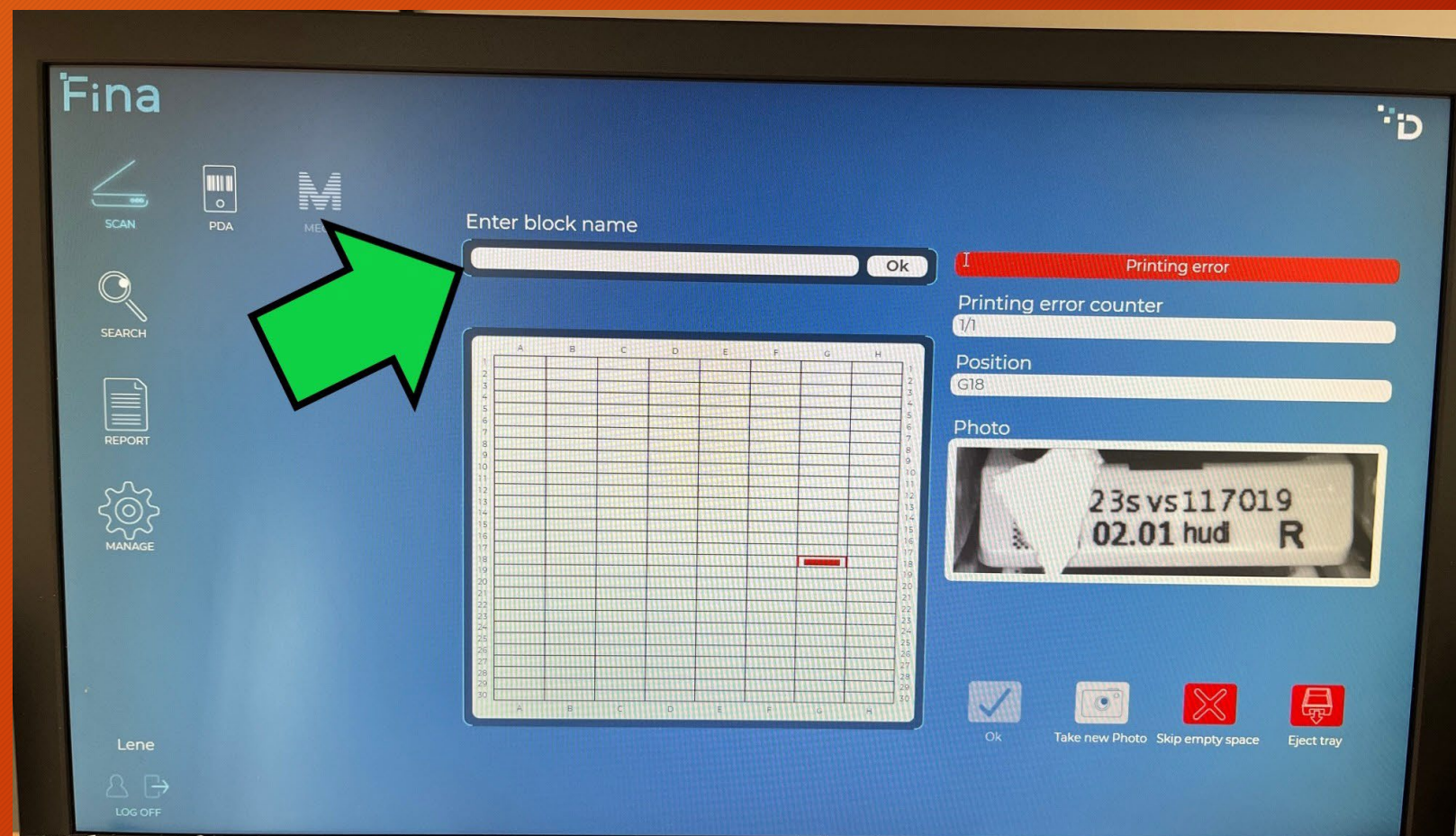


Daglig brug:

- Blok Arkivering:
 - Dårlige stregkoder:



Daglig brug:

- Blok Arkivering:
 - Dårlige strekkoder:

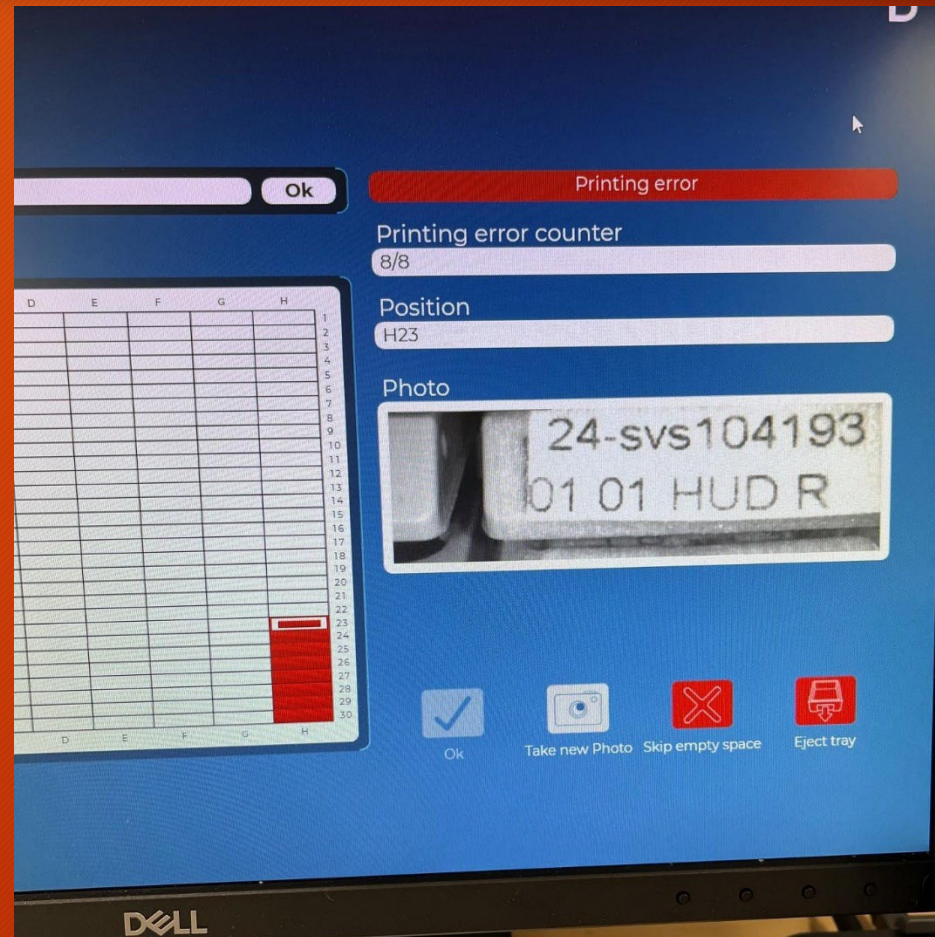

Daglig brug:

- Fremfindning af blokke i CGI:

Oversigt/Klarmeld, Sydvestjysk Sygehus

Direkte funktioner Print Hjælp

Niveau: Rekv Prøve Blokke Glas

Team (1): A B BIO GAS GYN HOH

Unders.(2): Ingen Prio(3): Ptype(4):

Farver(5): Kategori(6): Status(Z): MODT · KLAR

Rekvirent(8): CPR-nr.(9): - Extra bestil: Ja

Vis nr(10): Optæl blok-glas Mere..

Prøvenr	Bloknr	Bsta	S	Bproc.	Bpri	E	Prøvetype	Psta	Unds.
24svs103522.01	03	KLAR	T		R	U	HUDL	GL-SK	MWN
24svs103739.01	01	KLAR	T		R	U	HUDL	GL-SK	MWN
24svs103868.01	23	KLAR	R		P	U	MAMMAS	GL-SK	LATH
24svs103940.01	01	KLAR	S		P	U	LEVERNÅL	GL-SK	MWN
24svs104276.01	01	KLAR	T		P	U	MAMMAL	GL-SK	LATH
24svs104402.01	04	KLAR	R		H	U	MAMMAS	GL-SK	LATH
24svs600010.01	01		R		R	U	KONTROL	MAKS	

Rekvnr: 24svs600010 Daglig kontrol (200 år)

Antal: 7

Klinisk patologisk anatomi (Esbjerg) (ko)

Ny status: KLAR Undersg: * Prioitet: * Team: * ID1: abJD2:

Beh. markerede
Marker Alle
Alt på person

Dan gversigt Retur Rens billede Udskriv Etiketier Sign. Gem/vælg opsæt. Fjern linie Preview svar Scanninger Overfør til arkiv DK LRT ?

Daglig brug:

- Fremfindning af blokke i CGI:



The screenshot displays a software interface for a laboratory. The main window is titled 'Oversigt/Klarmeld, Sydvestjysk Sygehus'. It features a search and filter section at the top with fields for 'Niveau', 'Team (1)', 'Unders.(2)', 'Prio(3)', and 'Ptype(4)'. Below this is a table of samples with columns: 'Prøvenr', 'Bloknr', 'Bsta', 'S', and 'Bproc.'. The table contains several rows of data, with the first six rows highlighted in blue. An 'Arcos Integration' dialog box is open, showing 'Parametre' (Laboratorie: Bionalytiker, Begrundelse: Ekstra bestilling, Gældende til: 01/03/2024) and a 'Blokoversigt' table. The 'Blokoversigt' table has columns: 'Rekvnr + Matr.', 'Bloknr.', 'Ansvarlig', and 'Arkivstatus'. It lists several samples, with the one '24svs103739.01' highlighted in blue. At the bottom of the main window, there are buttons for 'Send blokke til arkiv', 'Hent status', and 'Retur'. The footer of the interface includes 'Rekvnr: 24svs600010', 'Daglig kontrol (200 år)', 'Antal: 7', 'Klinisk patologisk anatomi (Esbjerg) (ko)', and various navigation buttons like 'Dan oversigt', 'Retur', 'Rens billede', 'Udskriv', 'Etiketter', 'Sign.', 'Gem/vælg opsæt', 'Fjern linie', 'Preview svar', 'Scanninger', 'Overfør til arkiv', 'DK', 'LRT', and a help icon.

Prøvenr	Bloknr	Bsta	S	Bproc.
24svs103522.01	03	KLAR	T	
24svs103739.01	01	KLAR	T	
24svs103868.01	23	KLAR	R	
24svs103940.01	01	KLAR	S	
24svs104276.01	01	KLAR	T	
24svs104402.01	04	KLAR	R	
24svs600010.01	01		R	

Rekvnr + Matr.	Bloknr.	Ansvarlig	Arkivstatus
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs600010.01	01		Unknown
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs104402.01	04	Marianne B M	In stock
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs104276.01	01	Marianne B M	In stock
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs103940.01	01	Gitte	In stock
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs103868.01	23	Marianne B M	In stock
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs103739.01	01	Gitte	Checked out
<input checked="" type="checkbox"/> 24svs103522.01	03	Gitte	In stock


Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - CGI

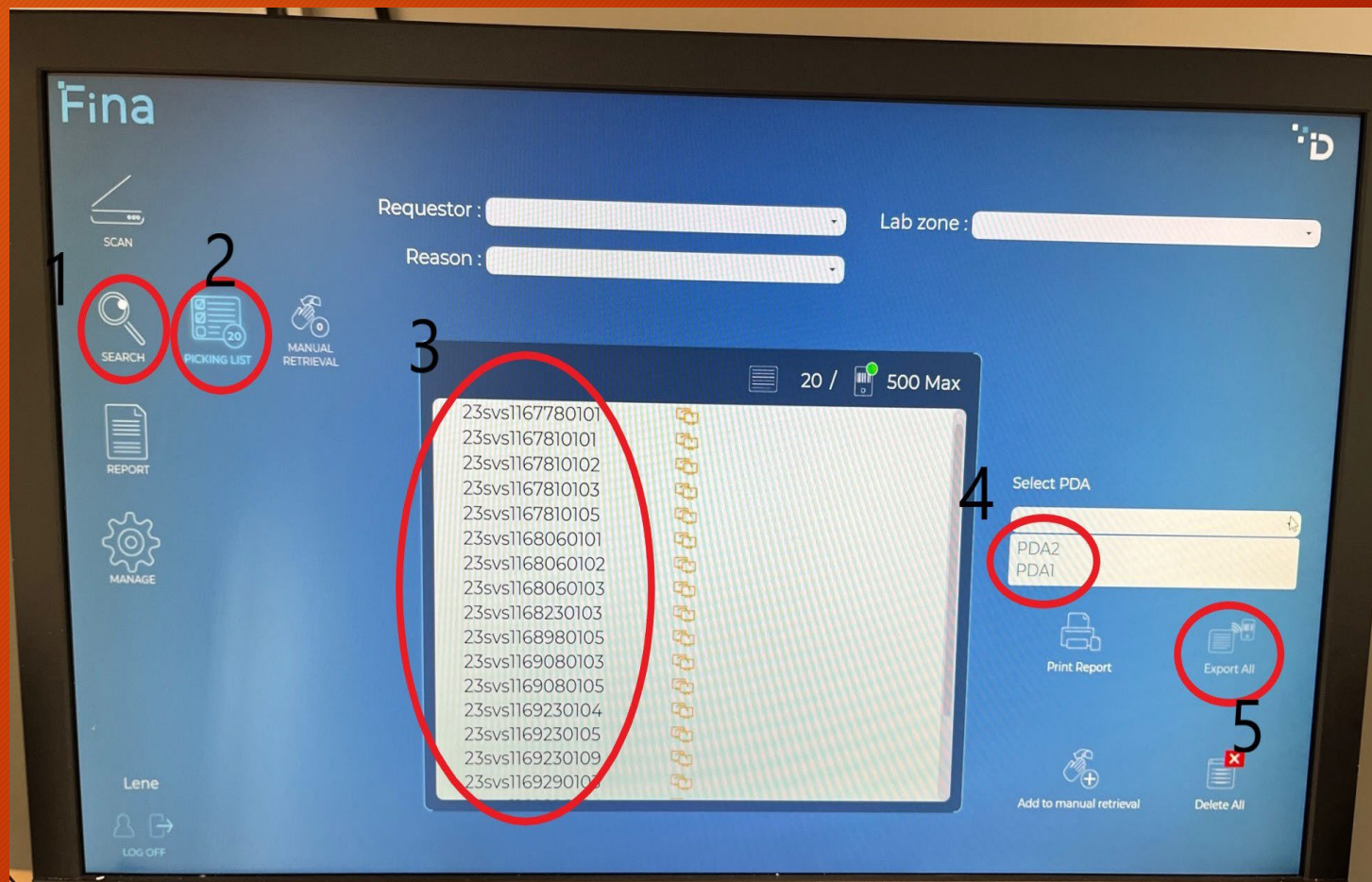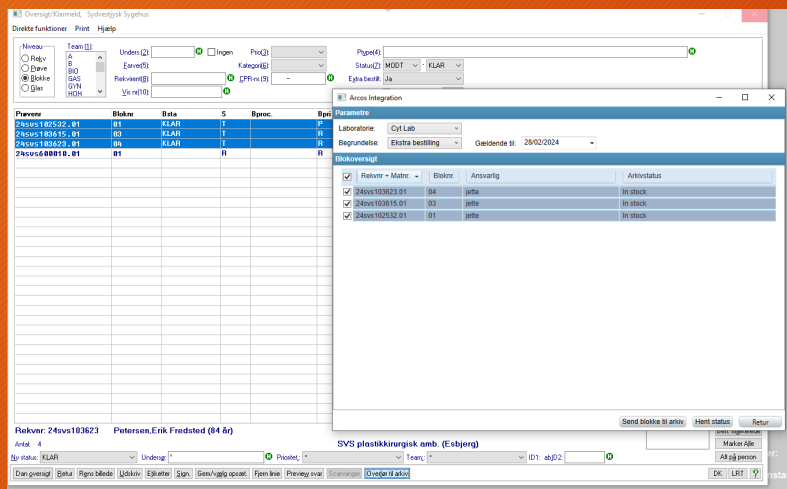



Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - PDA
 - Scan opbevaringszone

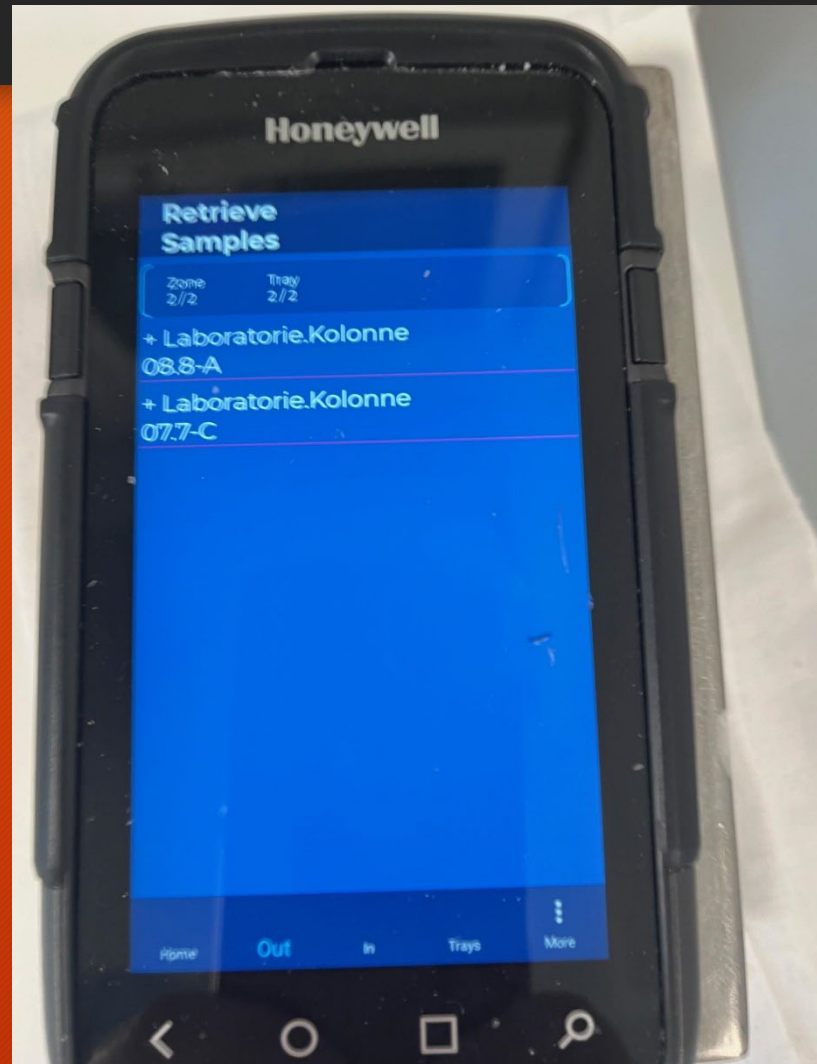




Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - PDA
 - Scan skuffe

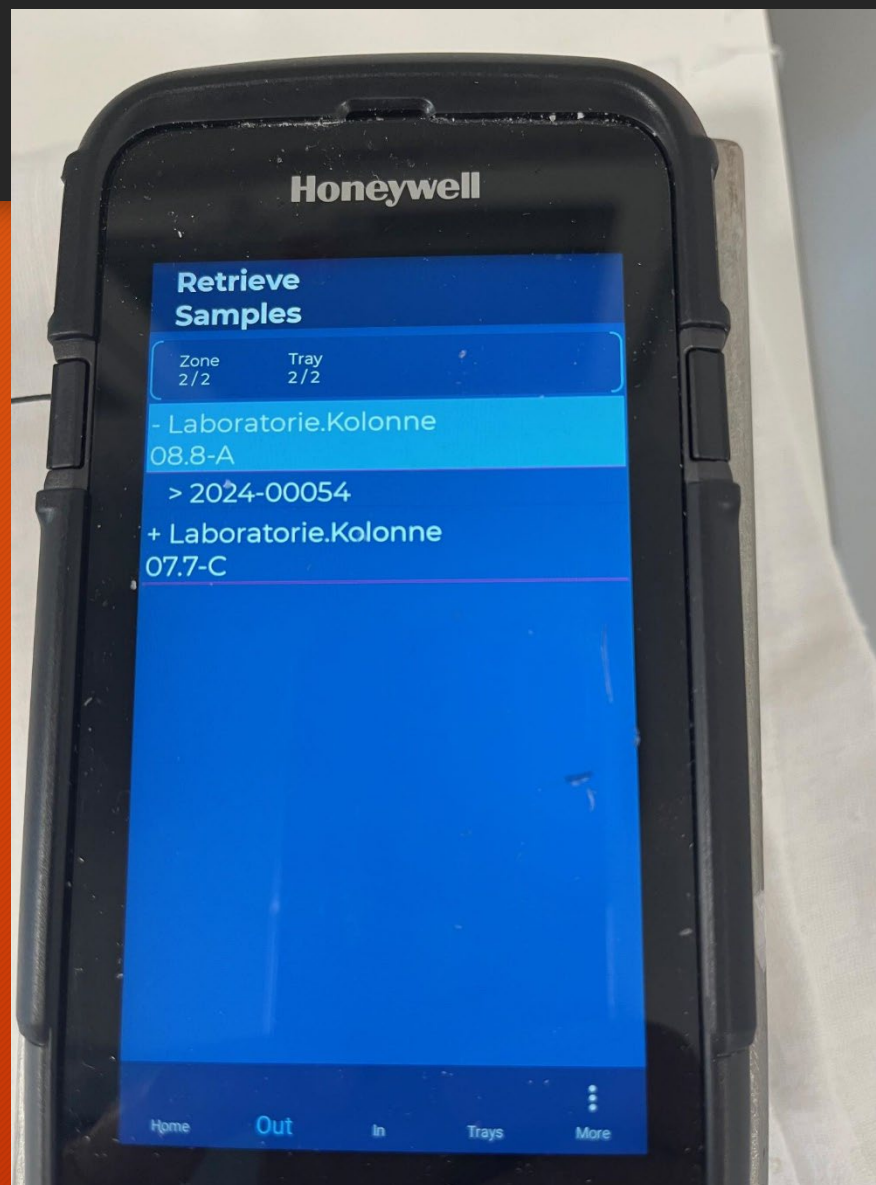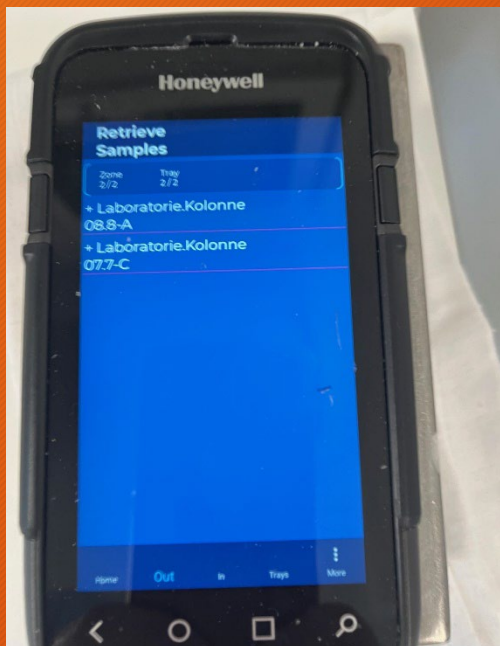





Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - PDA
 - Scan blokken

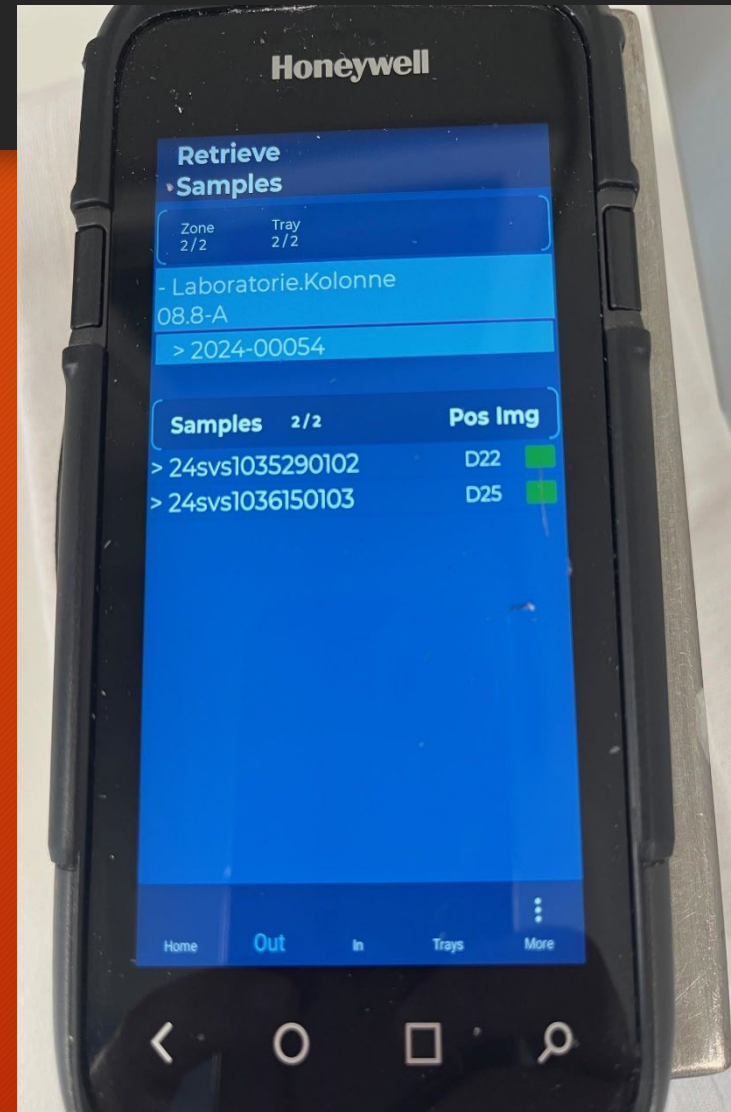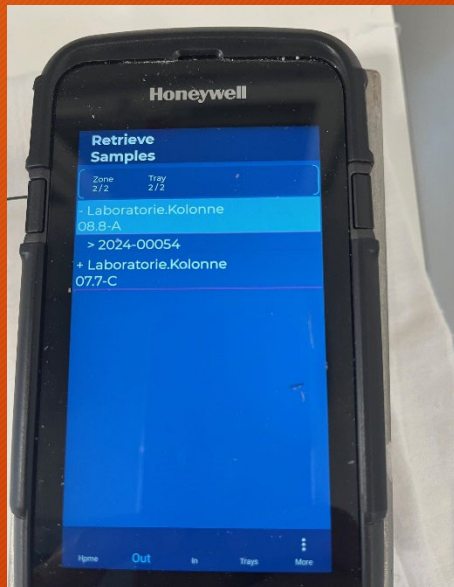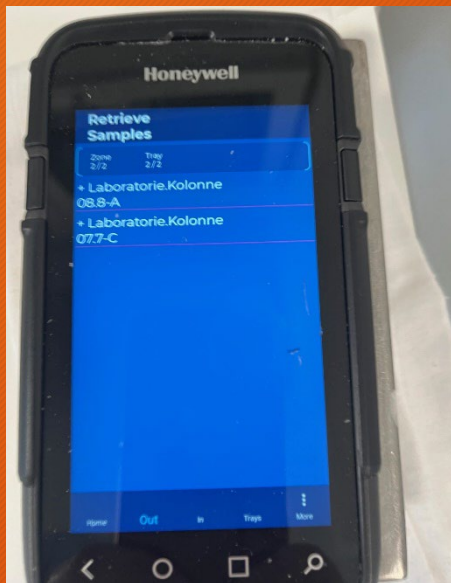





Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - PDA
 - Scan blokken

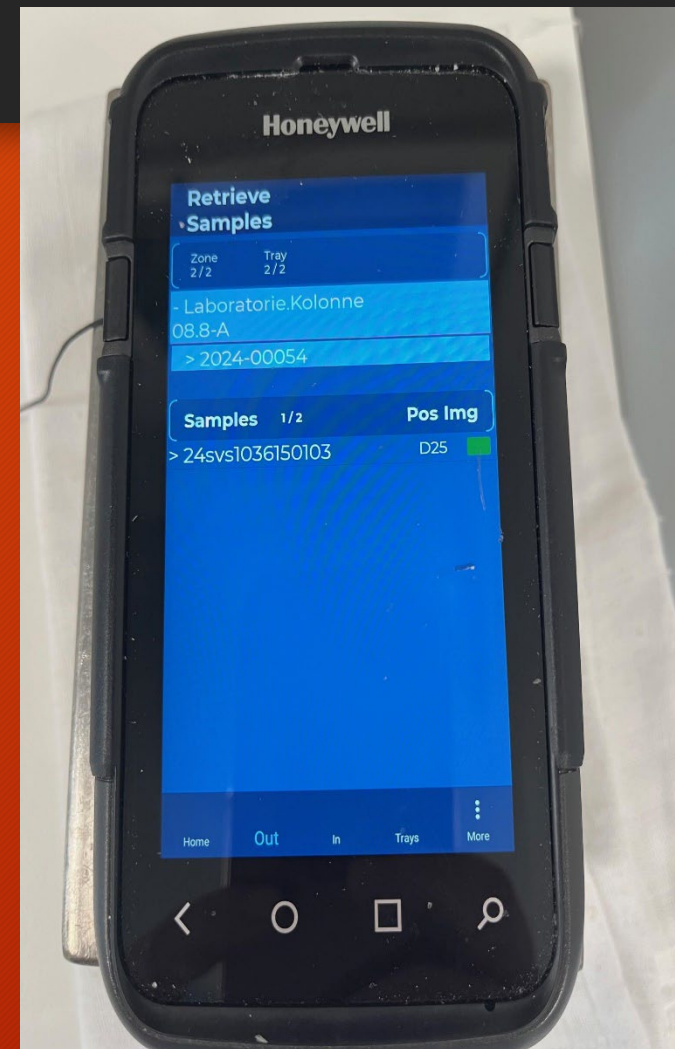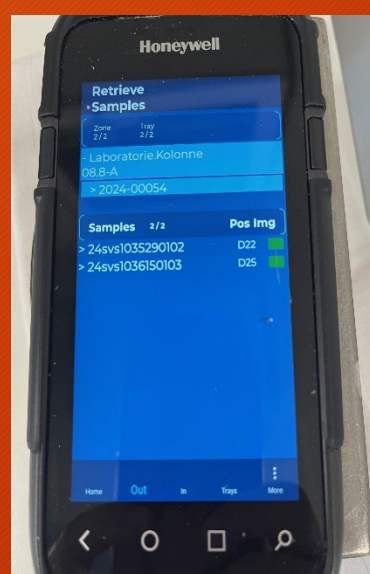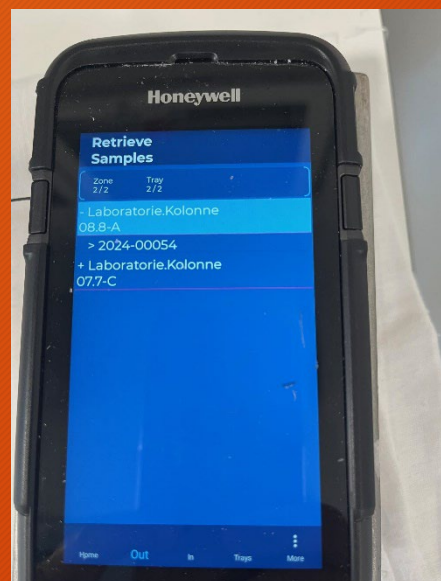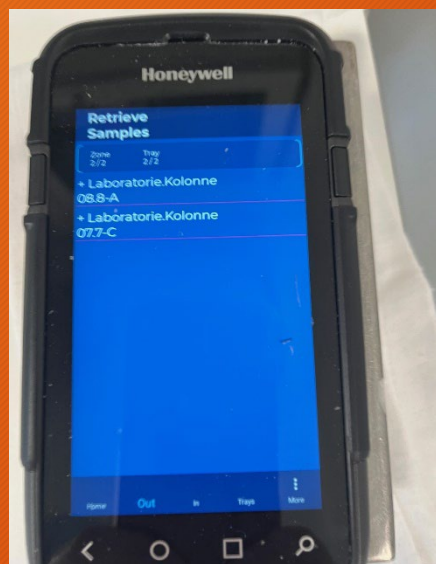



Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - PDA

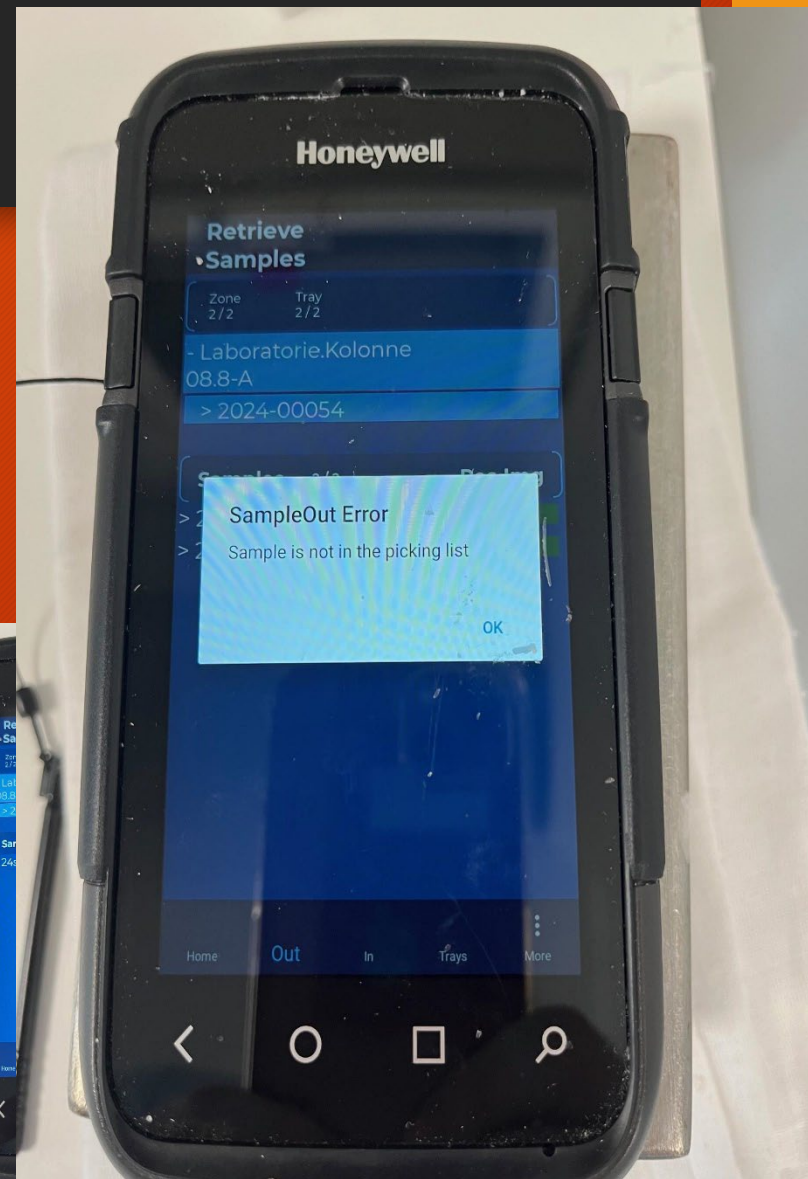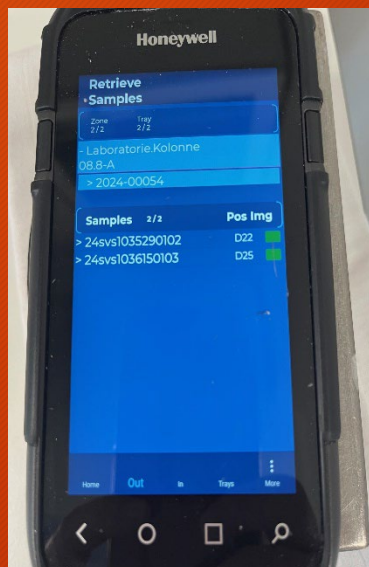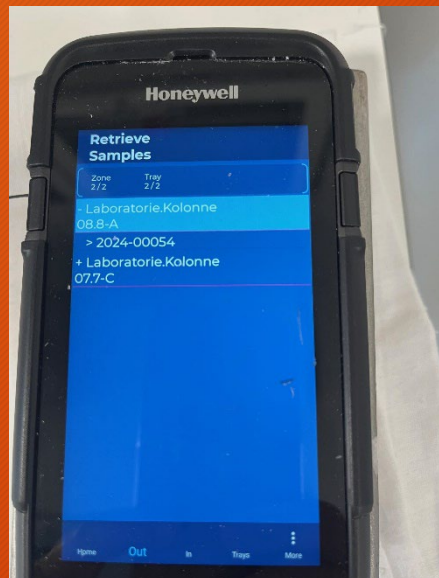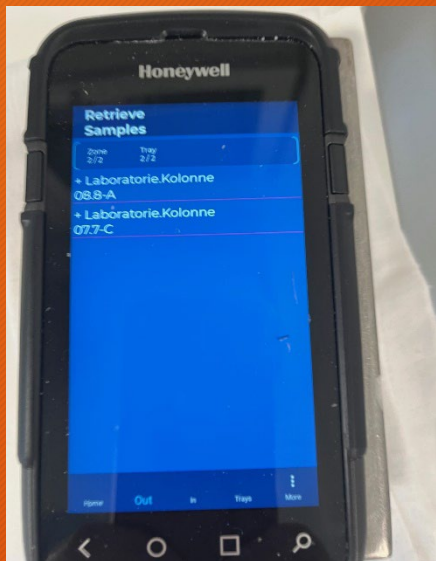

Daglig brug:

- Fremfindning af blokke:
 - FINA

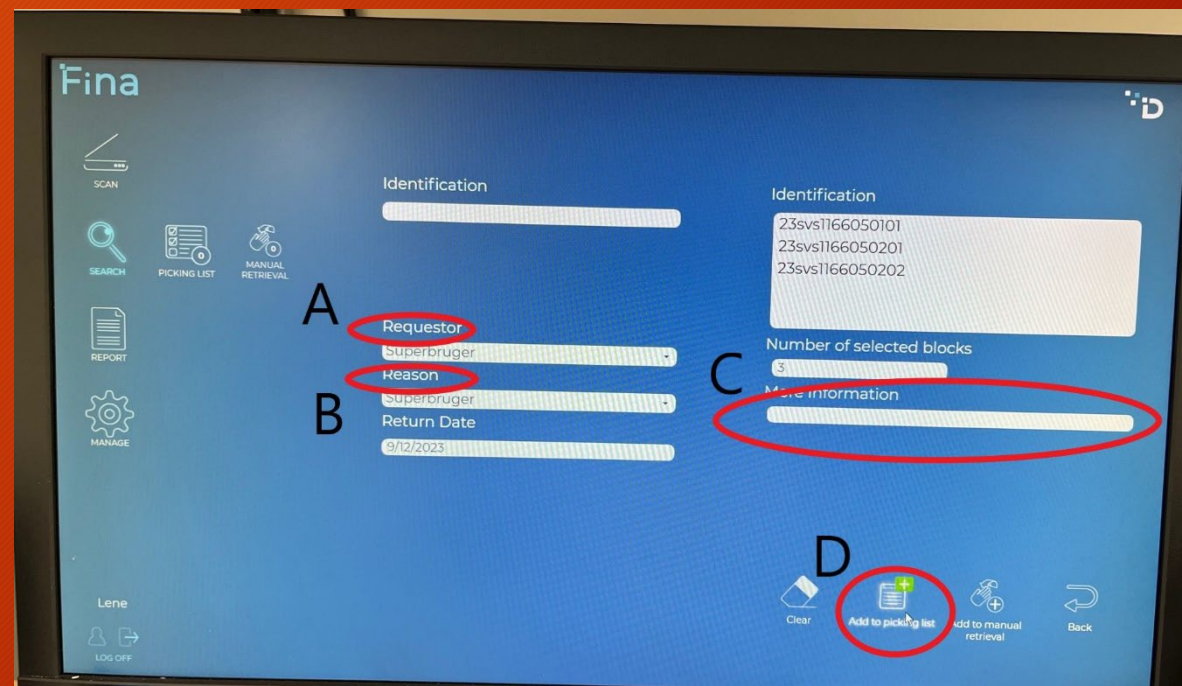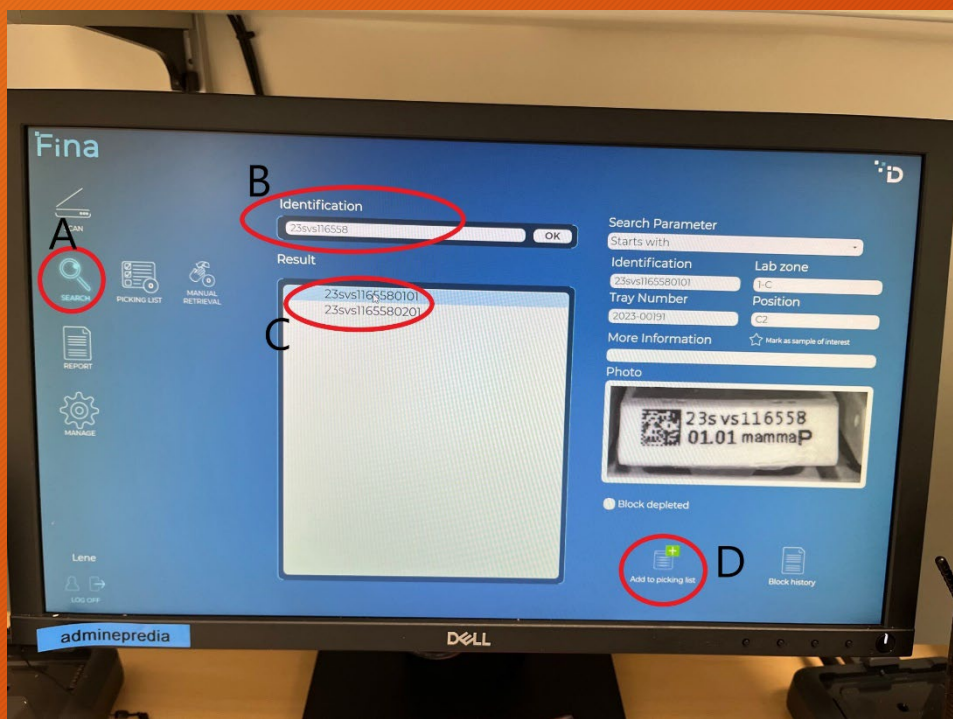


Makroblokke

- Log ind på PDA
- Scan label på en grå Megabakke
 - (max 45 stk)





Makroblokke

- Log ind på PDA
- Scan label på en grå Megabakke
 - (max 45 stk)

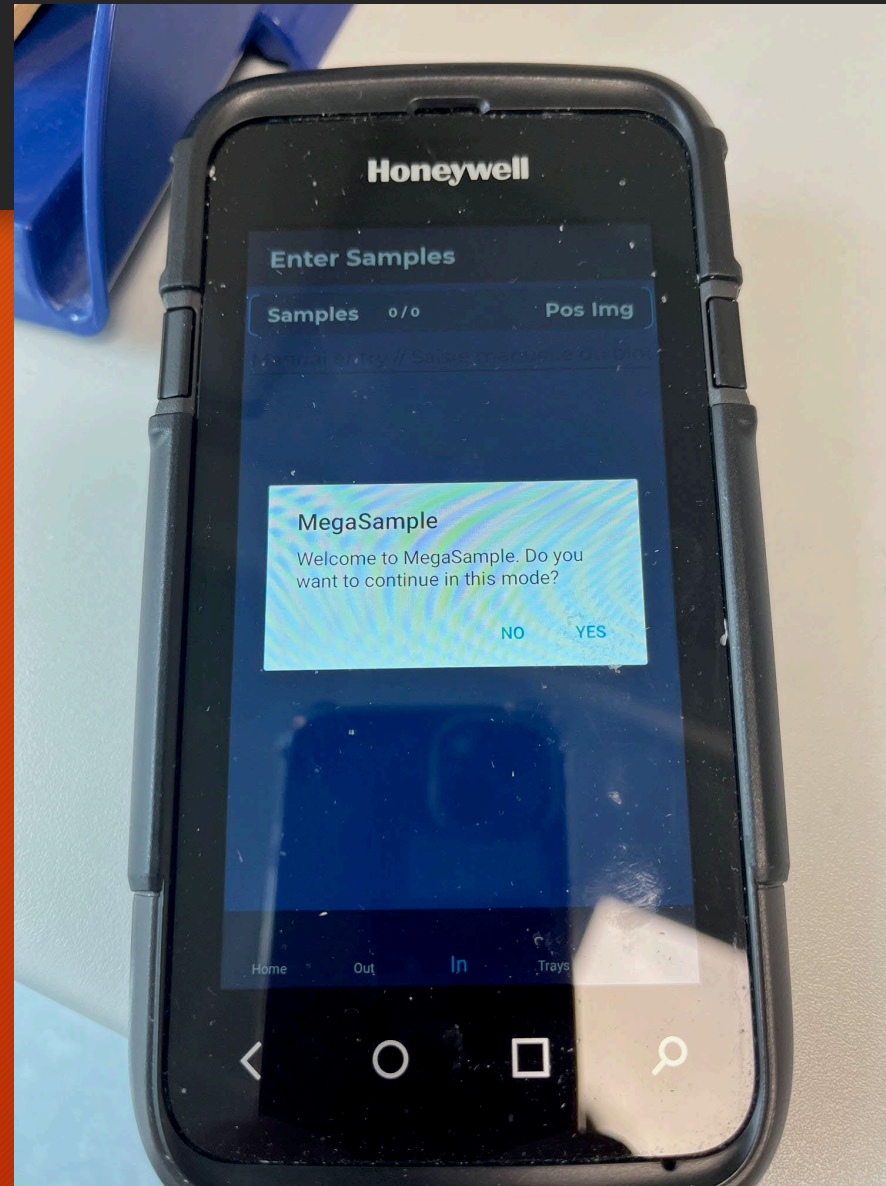


Makroblokke

- Log ind på PDA
- Scan label på en grå Megabakke
 - (max 45 stk)

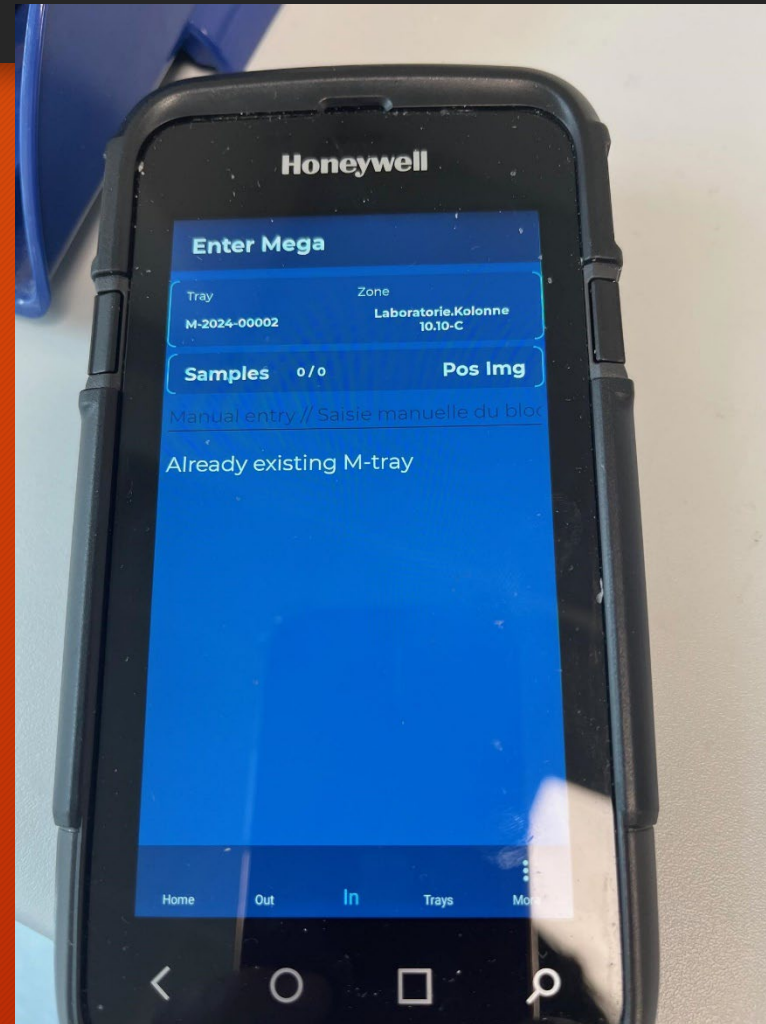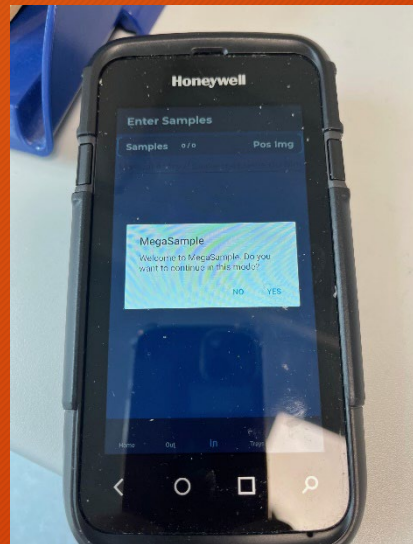



Makroblokke

- Log ind på PDA
- Scan label på en grå Megabakke
 - (max 45 stk)
- Scan de blokke der skal arkiveres

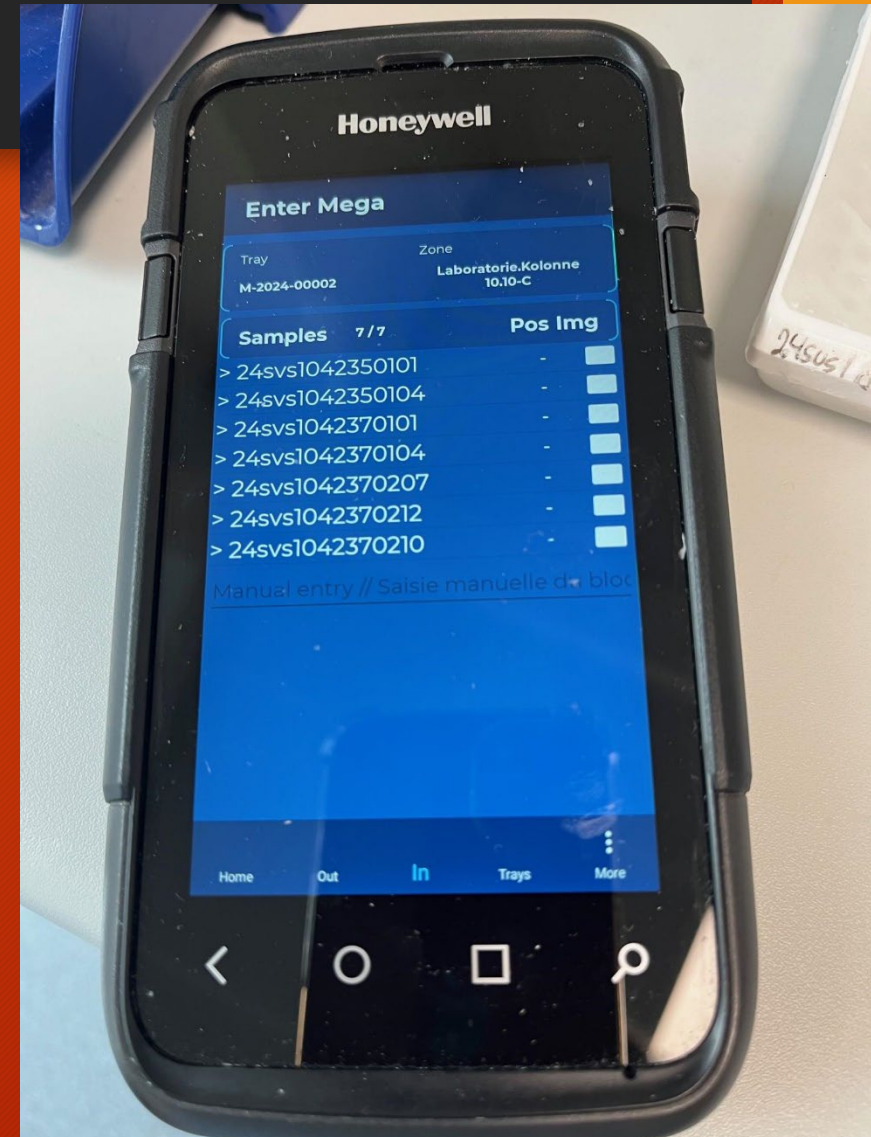


Makroblokke

- Log ind på PDA
- Scan label på en grå Megabakke
 - (max 45 stk)
- Scan de blokke der skal arkiveres
- Sæt PDA tilbage i dokkingsstationen

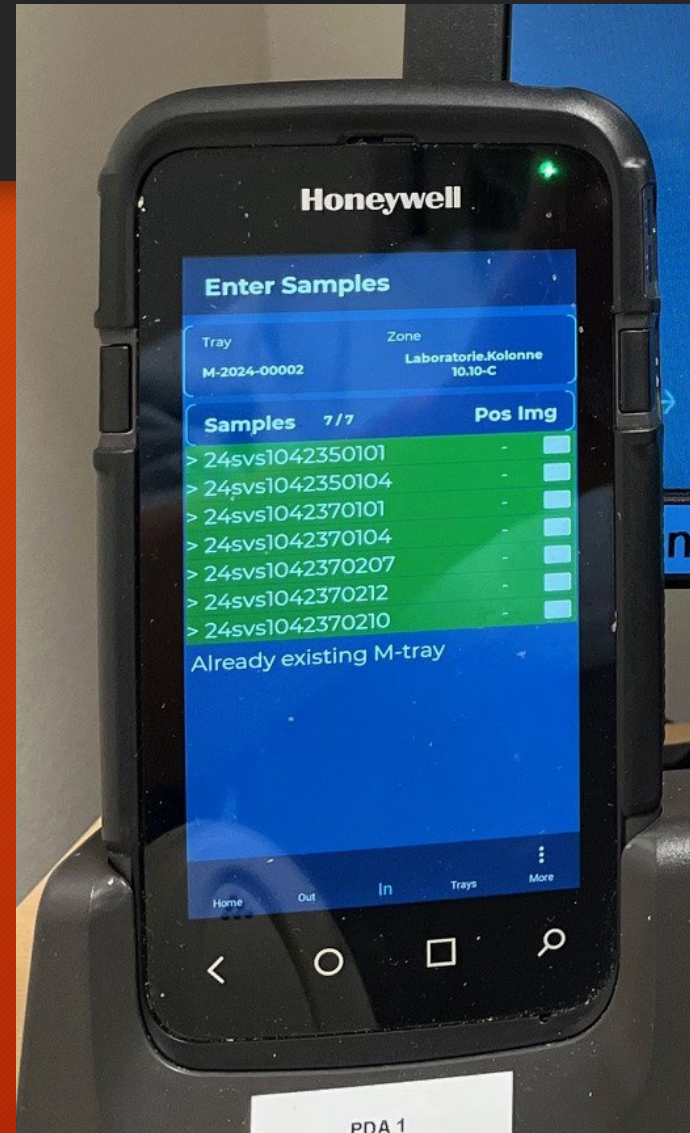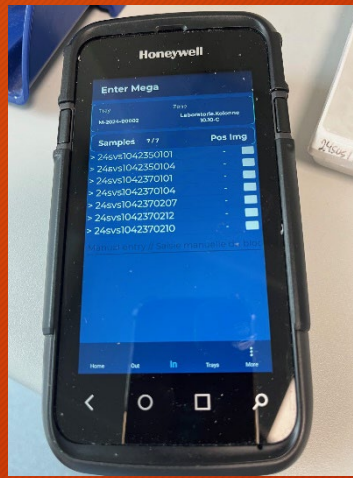


Makroblokke

- Scan de blokke igen
 - Submit

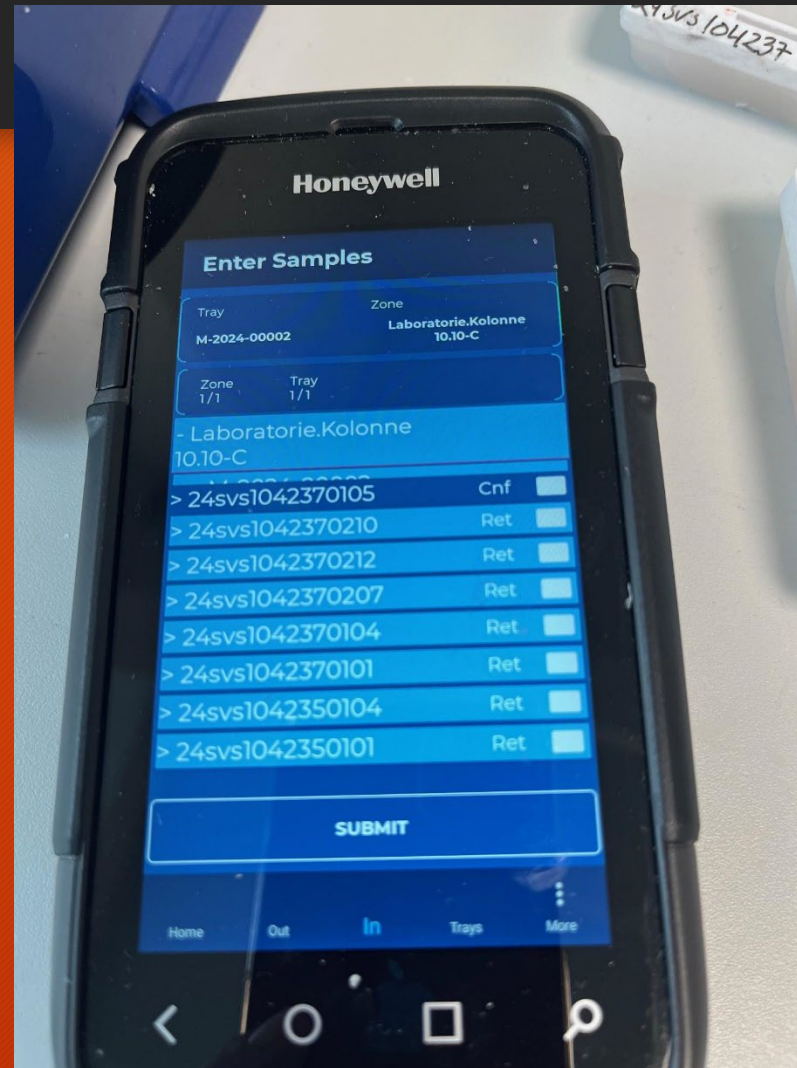

Makroblokke

- Scan de blokke igen
 - Submit
- Sæt blokkene i skuffen
 - Nummer rækkefølge
- Scan skuffen igen

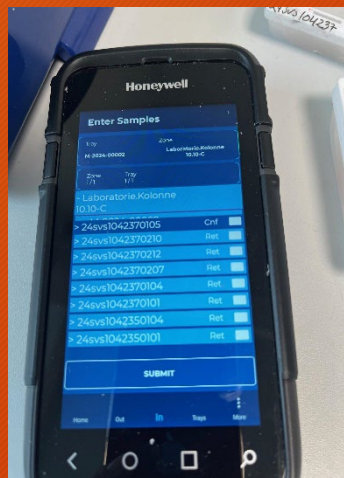

Fjern arkiv

- Nær arkiv ca 8 mrd



Fjern arkiv

- Nær arkiv ca 8 mrd
- Herefter fjernarkiv i kælderen
 - Flyttes digital via PDA



Fjern arkiv

- Nær arkiv ca 8 mrd
- Herefter fjernarkiv i kælderen
 - Flyttes digital via PDA



Fordele og ulemper

- Fordele:

- Nem og overskuelig
 - Ingen fejl arkivering
- Det virker
- Hurtig
- Let at finde gamle blokke
- Alarm ved ens blok nummer
- Blok historik

- Ulemper:

- Når det ikke virker !
- Hvis man ikke husker at scanne alt
- Utydelige stregkoder
 - Printerfejl => QA koden kunne ikke læses
- Økonomisk
- Fylder mere